

POSTUP TESTU

1. POSTAVTE ZKUMAVKU DO STOJÁNKU
2. NAKAPEJTE DO ZKUMAVKY 6 KAPEK TESTOVACÍ TEKUTINY Z LAHVIČKY (ODLOMTE UZÁVĚR)
3. VYJMĚTE Z OBALU STERILNÍ TYČINKU S TAMPONEM A ZASUŇTE DO NOSNÍ DÍRKY PŘIBLIŽNĚ DO HLOUBKY 2,5 CM OD OKRAJE NOSNÍ DÍRKY
4. PŘEJEĎTE TYČINKOU 5X PODÉL SLIZNICE UVNITŘ NOSNÍ DÍRKY A STEJNÝ POSTUP OPAKUJTE I U DRUHÉ NOSNÍ DÍRKY
5. VLOŽTE TYČINKU S TAMPONEM DO ZKUMAVKY A OTOČTE S NÍ ASI 10X
6. ZATLAČTE HLAVU TAMPONU NA STĚNU ZKUMAVKY, ABY SE UVOLNIL ANTIGEN A PO TĚ JI NECHTE STÁT ASI 1 MINUTU
7. STLAČTE ŠPIČKU TAMPONU, ABY Z NĚJ VYTEKLO CO NEJVÍCE KAPALINY A VYTÁHNĚTE ZE ZKUMAVKY, TAMPON VYHOĎTE DO PŘIPRAVENÉHO KOŠE
8. NESAĎTE ODKAPÁVAČ NA ZKUMAVKU, UZAVŘETE A NECHTE ASI 1 MINUTU STÁT
9. OTEVŘETE SÁČEK A VYJMĚTE TESTOVACÍ KARTU, PŘIDEJTE 3 KAPKY DO OTVORU PRO VZOREK A ZAČNĚTE POČÍTAT ČAS
10. POČKEJTE, AŽ SE OBJEVÍ BAREVNÝ PROUŽEK, NA VÝSLEDEK ČEKEJTE 15 MINUT

